

Anforderungsbogen für das MRSA Aufnahme-Screening

Name, Vorname, Adresse			Einsender
geb. am			
Kassen-Nr.	Versicherungs-Nr.	Status	Klin. Angaben, Diagnose, Therapie, Vorbefunde
Vertragsarzt-Nr.	VK gültig bis	Datum	

Material für MRSA Schnelltest

Entnahmedatum: _____

1. Tupfer

☐ Nase re/li

2. Tupfer

☐ Wunde (bitte spezifizieren): _____

☐ Rachen (falls keine Wunde vorhanden)

Tel. Befundübermittlung an: _____

Anleitung für MRSA-PCR-Diagnostik / -Abstrichbesteck

Inhalt: 2 trockene Abstrichtupfer
1 Schraubdeckelröhrchen mit 1 ml physiologischer NaCl-Lösung (steril)

Vorgehensweise:

Tupfer durch Eintauchen in die beigegegebene NaCl-Lösung befeuchten

1. Tupfer

beide Nasenvorhöfe abstreichen und anschließend Tupfer zurück in die Hülle stecken;
Hülle mit Patientennamen und mit „Nase“ beschriften.

(für beide Nasenvorhöfe wird **nur 1 Abstrichtupfer** benötigt)

2. Tupfer

sofern Wunde vorhanden, diese abstreichen und anschließend Tupfer zurück in die Hülle stecken; Hülle mit Patientennamen und mit „Wunde/Entnahmeort“ beschriften;

alternativ Rachen abstreichen und anschließend Tupfer zurück in die Hülle stecken;
Hülle mit Patientennamen und mit „Rachen“ beschriften.

Lagerung der Tupfer bei Raumtemperatur.

WICHTIG: nur die beigegefügtten trockenen Tupfer verwenden, keine Geltupfer!